




Firstbeat –mittalaite: Asetukset ja tiedonpurku


ASETUKSET JA OHJELMA

- käynnistä ohjelma

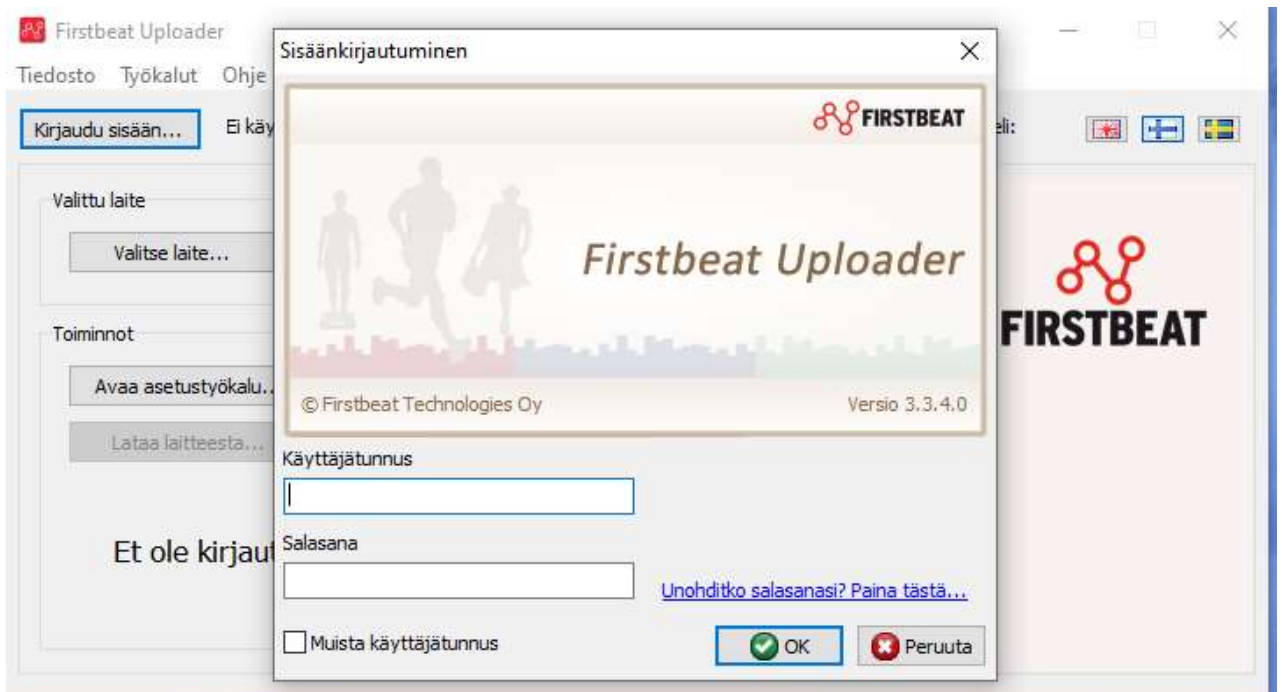


- Valitse peruuta, tunnuksia ei tarvita ohjelman käyttöön




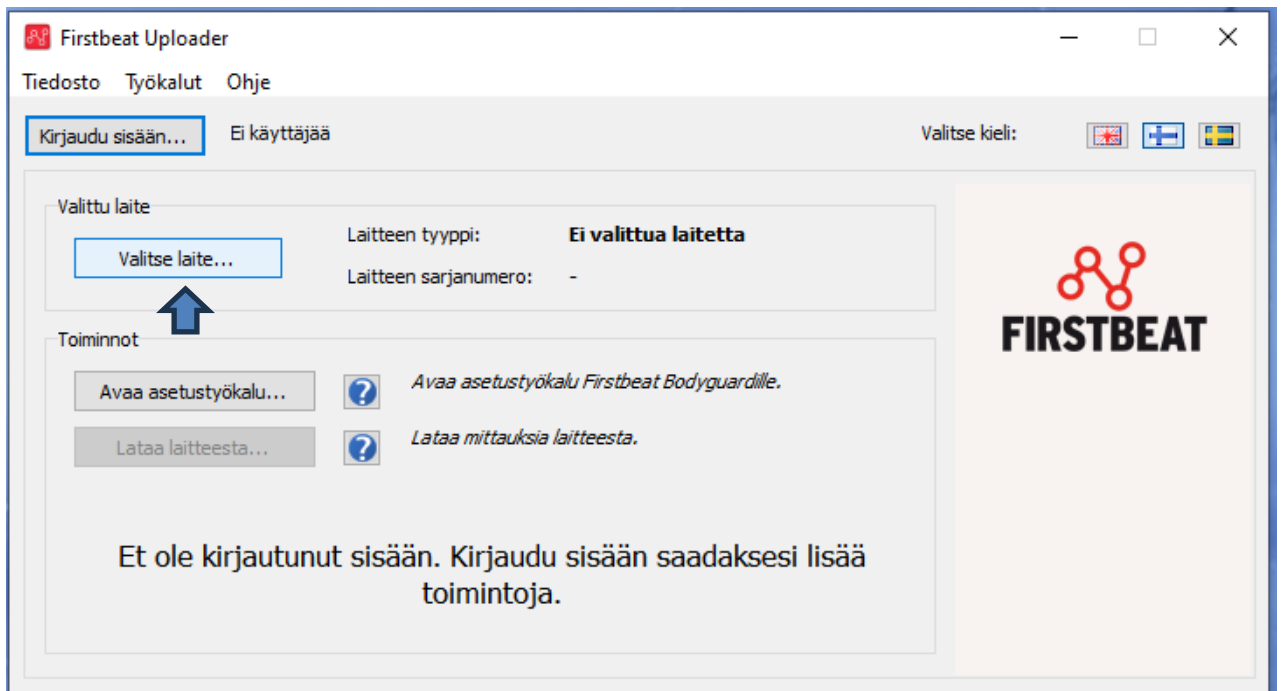

- Laita laite kiinni koneeseen ja paina **valitse laite**

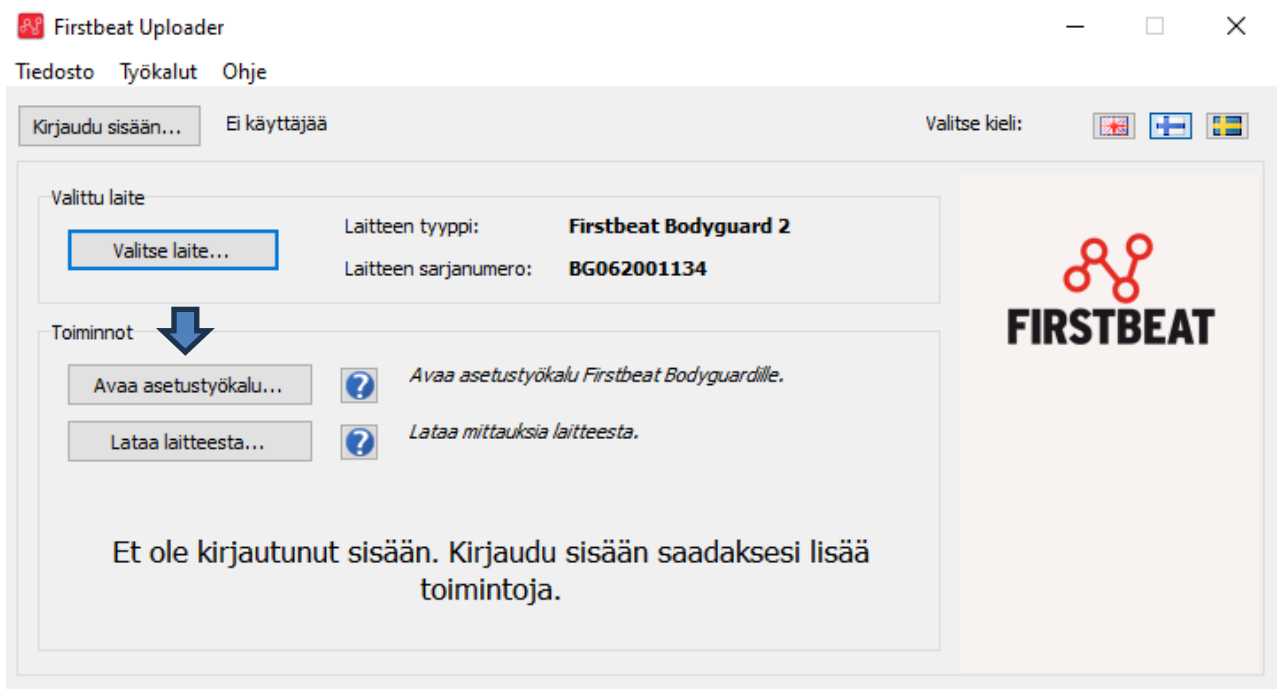


- Valitse **"Avaa asetustyökalu"**

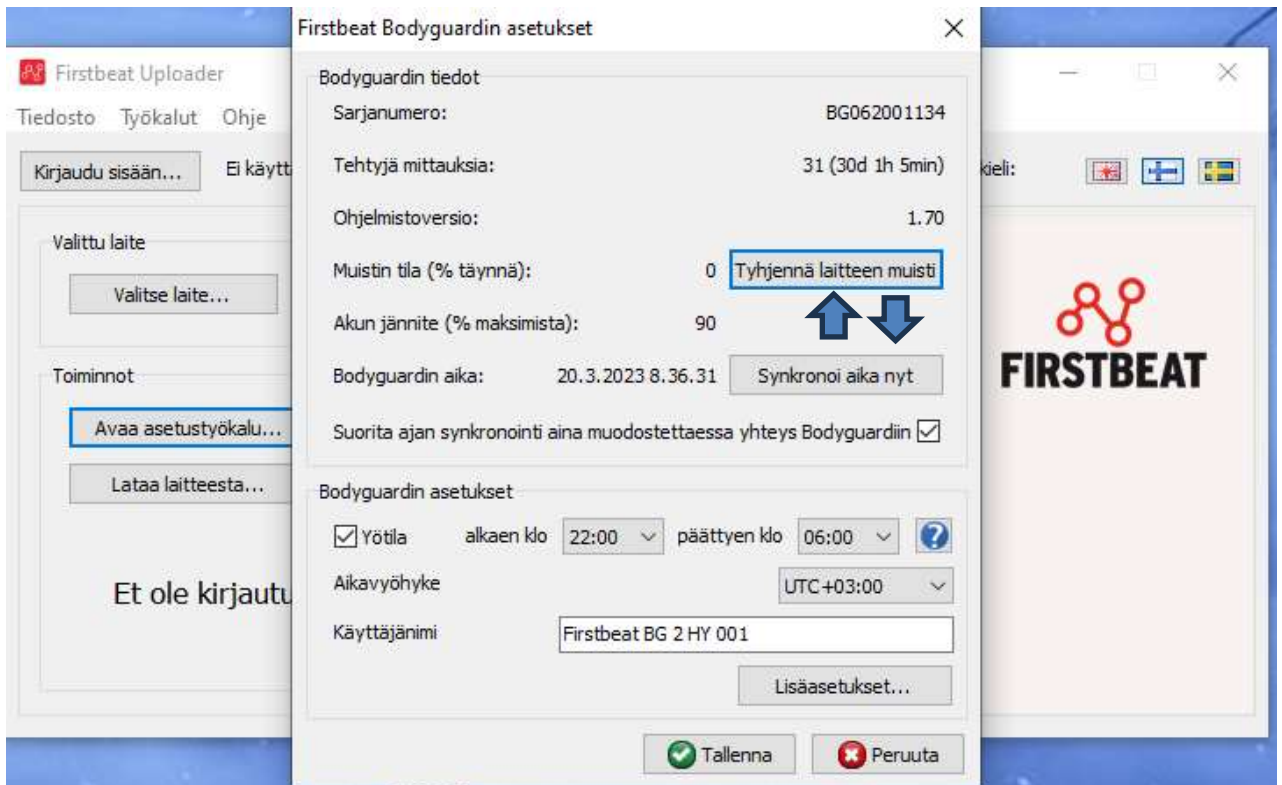

- Jos uusi käyttäjä, ”**tyhjennä laitteen muisti**” ja synkronoi kello ”**synkronoi alka nyt**”
- Valitse ”**tallenna**”

TIETOJEN LATAAMINEN

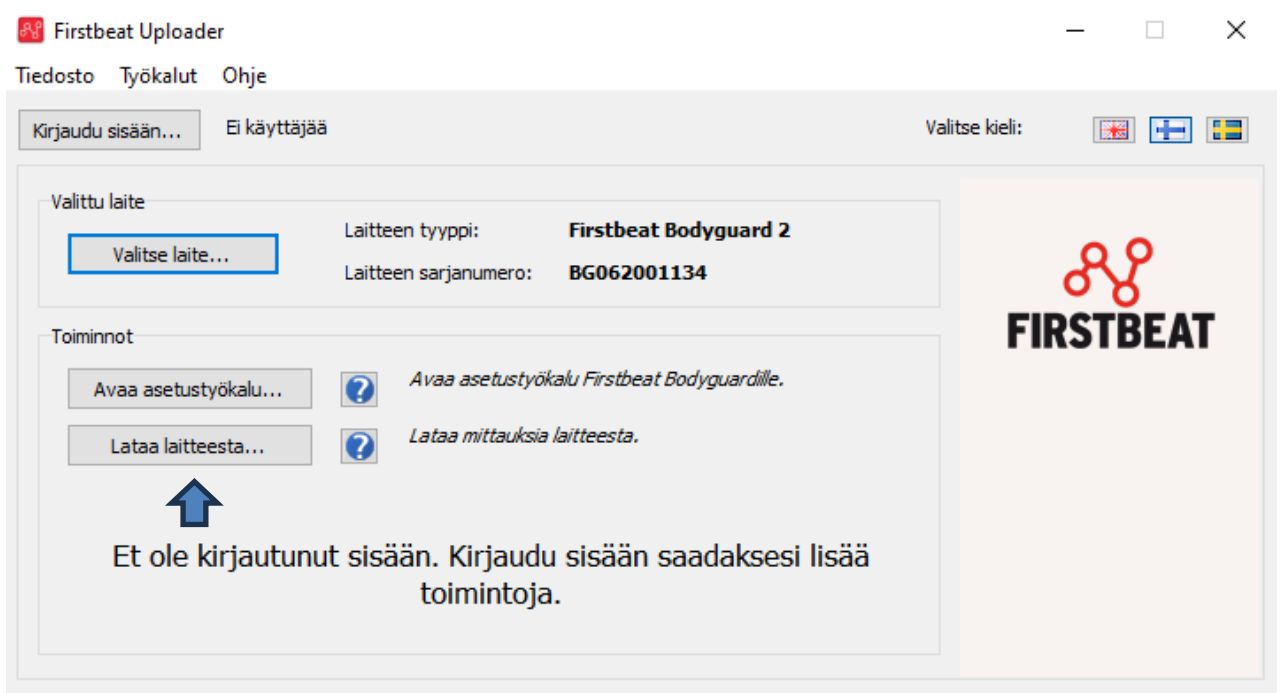

- Laita laite kiinni ja valitse laite. Sen jälkeen valitse ”**Lataa laitteesta...**”



Lataa Bodyguardista

Valitse ladattavat mittaukset.

Lataa	Alkuaika	Kesto	Loppuaika	Ladattu
<input checked="" type="checkbox"/>	20.3.2023 8.40.16	00:02:15	20.3.2023 8.42.31	

Valitse kaikki

Toiminnot

Korjaa mittauksen alkuaikat Bodyguardin aikavyöhykkeen perusteella.

Poista mittaukset Bodyguardista

Älä näytä tätä uudelleen. Lataa ja poista mittaukset automaattisesti.

-valitse kaikki boksit "**lataa**" alta

-valitse "**ok**"

File name:

Save as type:

Hide Folders

- Tee tutkittavalle kansio ja vaihda oletusnimen("firstname_lastname") tilalle haluttu ID tai vastaa tunniste